

beurer

MC5000



Масажне крісло Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку **Beurer**. Компанія **Beurer** – європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**

Зміст

1. Користування приладом за призначенням
2. Вказівки з техніки безпеки.....
3. Для ознайомлення.....
4. Опис приладу.....
5. Підготовка до користування приладом
6. Користування приладом.....
7. Догляд і зберігання.....
8. Що робити при виникненні несправностей?
9. Технічні характеристики.....
10. Гарантія.....

Комплект постачання

- Масажне крісло
- Подушка для сидіння
- Подушка під спину
- Подушка для голови
- Пульт керування

Пояснення символів

В інструкції з користування приладом та/або на маркувальній табличці використовуються такі символи:

	Прочитайте інструкцію з користування приладом.
	Попередження! Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	Увага! Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Важливо! Вказує на важливу інформацію.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях.
	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту 2.
	Не встромляйте в прилад голки.
	Перехресне посилання на інший абзац.
	Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища

	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Знак СЕ Цей виріб відповідає вимогам чинних європейських і національних директив.
	Продукція пройшла підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів ЄАЕС.

1. Користування приладом за призначенням

Масажне крісло призначене для масажу спини, ніг і ступень.

Уважно дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки, наведених в даній інструкції з користування приладом.

Використовуйте прилад тільки зазначеним способом.

Прилад розроблений виключно для **індивідуального використання**, та не призначений для використання з медичною або комерційною метою.

2. Вказівки з техніки безпеки

- **Уважно прочитайте інструкцію з користування приладом! Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травмування людей або**

завдання матеріальних збитків.

- Надійно зберігайте інструкцію, щоб мати можливість звернутися до неї і пізніше. Вона має бути доступною також іншим користувачам.
- Передаючи прилад іншим особам, передавайте також і цю інструкцію.

Ураження електричним струмом

⚠ Попередження!

- Як і будь-яким іншим електроприладом користуватися цим масажним кріслом потрібно обережно та дбайливо, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом.
- Використовуйте прилад лише при напрузі, вказаній на блоці живлення.
- Не використовуйте прилад або додаткове обладнання за наявності видимих пошкоджень.
- Не використовуйте прилад при випадковому потраплянні в нього води.
- Не використовуйте прилад під час

грози.

- Використовуйте прилад лише у закритих приміщеннях і уникайте потрапляння на нього прямих сонячних променів.
- Негайно вимкніть прилад у випадку виявлення пошкодження або несправностей. Вийміть штекер з розетки.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, щоб від'єднати його від розетки.
- Не затискайте кабель живлення.
- Кабель живлення слід тримати подалі від гарячих поверхонь.
- Переконайтеся, що прилад, вимикач та кабель не контактують з водою, іншими рідинами або паром.
- Торкайтеся до приладу тільки сухими руками.
- Бережіть прилад від ударів і падінь.

Ремонт приладу

 **Попередження!**

- Не відкривайте прилад.
- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки спеціалістам.
За неправильно виконаного ремонту користувач наражає себе на небезпеку. Якщо прилад потребує ремонту, зверніться до сервісної служби або до авторизованого торгового представника, в іншому випадку гарантія втрачає свою силу.
- Якщо штекер або кабель живлення пошкоджено, їх має замінити авторизована сервісна служба.
- Забороняється відкривати застібку-блискавку масажного крісла. Вона використовується тільки для технічних цілей.
- Не встромляйте голки або інші гострі предмети у крісло.

Небезпека виникнення пожежі



Попередження!

Використання приладу не за

призначенням
або недотримання правил, наведених у
цій інструкції, може за певних
обставин призвести до пожежі!

- Завжди стежте, щоб прорізи для вентиляції залишалися відкритими. Оберігайте прорізи для вентиляції від потрапляння пилу, волосся тощо.
- Не використовуйте масажне крісло разом з іншими електричними приладами (наприклад, з електроковдрою).
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо поблизу знаходиться бензин або інші легкозаймисті речовини.

Використання

Попередження!

Цей прилад призначений виключно для масажу спини, ніг і ступень. Він не може замінити медичне лікування! Не користуйтеся масажними приладами у випадках, що відповідають одній або

кільком з наступних попереджувальних вказівок.

Не використовуйте прилад:

- для масажування ділянок шкіри з болісними змінами або пошкодженнями в області спини (наприклад, при міжхребцевій грижі);
- для масажу дітей;
- під час вагітності;
- під час сну;
- для масажу тварин;
- у разі здійснення будь-яких видів діяльності, за яких непередбачена реакція може бути небезпечною;
- після прийому речовин, що обмежують здатність сприйняття (наприклад, болезаспокійливих медикаментів, алкоголю).

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо не впевнені у правильності вибору масажного приладу.

Перед використанням масажного

приладу проконсультуйтеся з лікарем, особливо у наступних випадках:

- при тяжких захворюваннях або перенесених операціях у верхній частині тіла;
- за наявності електростимулятора, імплантатів чи інших медичних пристроїв;
- при тромбозах;
- діабеті;
- при нез'ясовних болях.
- Використовуйте прилад за призначенням і згідно інструкції з користування приладом. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.
- Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими психічними,

сенсорними або розумовими здібностями, з недостатніми знаннями або досвідом, окрім випадків, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримали від Вас вказівки щодо використання приладу.

- Ніколи не чіпайте руками масажний механізм і ролики під час роботи приладу. Небезпека защемлення!
- Не кладіть жодні предмети в отвори на приладі, та нічого не встромляйте в його рухомі частини. Переконайтеся, що всі рухомі частини можуть вільно рухатися.
- Необхідно наглядати за дітьми та не дозволяти їм гратися із приладом.
- Після кожного використання вимикайте пристрій за допомогою головного вимикача.
- Розмістіть кабель живлення так, щоб він не заважав вільному пересуванню.

- Ніколи не вставайте ногами на прилад і не ставте на нього предмети.
- Ніколи не використовуйте крісло для масажу набряків, запалених ділянок або місць зі шкірними захворюваннями.
- Не використовуйте прилад при болях у шлунку, причини яких не можна пояснити.
- Заборонено використовувати масажне крісло кількома особами одночасно.
- Не перевищуйте максимальне навантаження 200 кг.

 Увага!

- Оберегайте прилад від прямого сонячного проміння.
- Не експлуатуйте прилад за температури понад 40 °C.
- Після тривалого простою переконайтесь у справності приладу.


3. Для ознайомлення

З масажним кріслом Beurer MC5000 можна насолоджуватись масажем у себе вдома. Масажне крісло дозволяє скористатися різними видами масажу, що забезпечують корисний і освіжаючий вплив.

Три масажні програми дозволяють здійснювати масаж різних ділянок тіла. Крім того, масажне крісло має додаткову функцію масажу тиском повітря в області литок, ступень і сидниць.


4. Опис приладу

Вид зовні

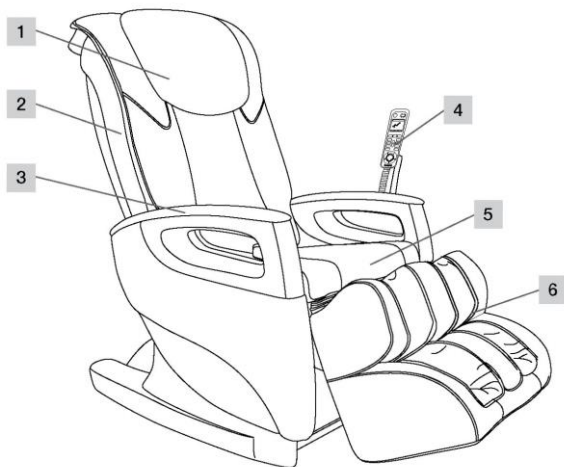


- 1 Подушка для голови
- 2 Спинка
- 3 Підлокітник

- 4 Пульт керування
- 5 Подушка для сидіння
- 6 Підставка для ніг

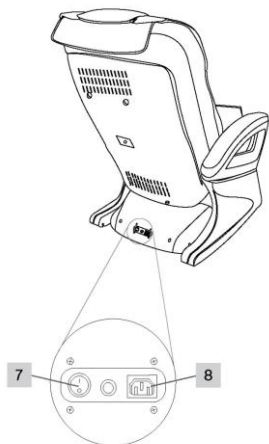


- 7 Головний вимикач
- 8 Підключення від мережі

Внутрішнє влаштування

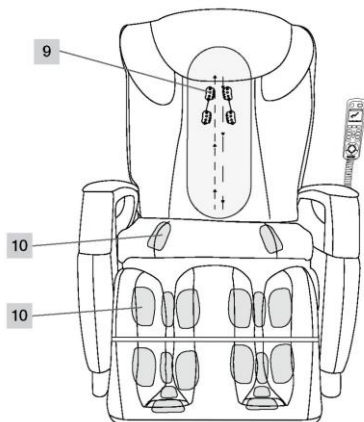

- 9 Масажні ролики
- 10 Точки масажу тиском повітря

Пульт керування

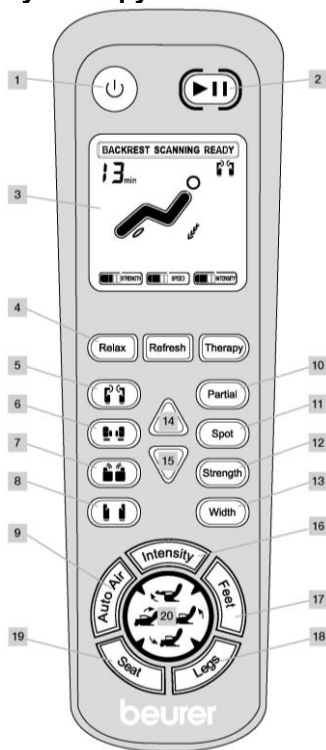

- 1 Кнопка «Увімк./Вимк.»
- 2 Кнопка паузи
- 3 Дисплей
- 4 Автоматичні програми масажу
- 5 Розминаючий масаж
- 6 Масаж поплескуванням
- 7 Масаж шиацу
- 8 Переключуючий масаж
- 9 Автоматична програма масажу тиском повітря
- 10 Partial (масаж окремих частин тіла)
- 11 Точковий масаж
- 12 Сила розминаючого та поплескуючого масажу
- 13 Відстань між масажними роликami
- 14 Переміщення роликів вгору
- 15 Переміщення роликів вниз
- 16 Інтенсивність (масаж тиском повітря)
- 17 Масаж тиском повітря: ступні
- 18 Масаж тиском повітря: литки

19 Масаж тиском повітря: сідниці

20 Кнопки вибору положення

Підйом підставки для ніг

Підйом спинки

Нахил підставки для ніг

Нахил спинки

Функції кнопок на пульті керування

Кнопка «Увімк./Вимк.»



> Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.» 
Масажне крісло готове до роботи.

Кнопка паузи



> Натисніть кнопку паузи 
*Виконання поточної програми перерветься.
Масажне крісло працює у режимі очікування
(Standby).*

> Ще раз натисніть кнопку паузи 
*Виконання програми продовжиться з того
місця, де вона була перервана.*

Дисплей



На дисплеї відображаються функції та поточні налаштування.

- Поточна програма масажу
- Поточні налаштування сили та інтенсивності
- Поточне положення масажних роликів
- Тривалість масажу, що залишилася

Програми масажу

- Масаж тиском повітря можна вмикати або вимикати окремо.
- Після закінчення масажної програми крісло переходить у режим очікування.
- Масаж можна зупинити будь-коли. Для цього натисніть кнопку масажу повторно.
- Масаж можна перервати будь-коли. Для цього натисніть кнопку паузи.

Поточне налаштування відображається на дисплеї.

Автоматичні програми масажу

Масажне крісло має три програми, що запускаються автоматично: розслаблюючий, освіжаючий, лікувальний масаж і масаж тиском повітря.

Автоматичні програми дозволяють виконувати комбінований масаж для всієї спини: Розминаючий, поплескуючий, перекочуючий масаж і масаж шиї.

Розслаблюючий масаж




> Натисніть кнопку розслаблюючого масажу



*Програма масажу запуститься автоматично.
Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього
масажне крісло перейде у режим очікування.*

Освіжаючий масаж

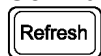


> Натисніть кнопку освіжаючого масажу



*Програма масажу запуститься автоматично.
Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього
масажне крісло перейде у режим очікування.*

Лікувальний масаж

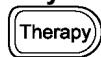

> Натисніть кнопку лікувального масажу



*Програма масажу запуститься автоматично.
Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього
масажне крісло перейде у режим очікування.*

Програми масажу



Розминаючий масаж

> Натисніть кнопку масажу



Запуститься програма масажу.

Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього масажне крісло перейде у режим очікування.



Поплескуючий масаж

> Натисніть кнопку масажу

Запуститься програма масажу.

Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього масажне крісло перейде у режим очікування.



Поплескуючий і розминаючий масаж

> Натисніть кнопки розминаючого



поплескуючого масажу

Обидва різновиди масажу можна увімкнути одночасно.



Шиацу

> Натисніть кнопку масажу

Запуститься програма масажу.

Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього масажне крісло перейде у режим очікування.



Ролики

> Натисніть кнопку масажу

Запуститься програма масажу.

Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього масажне крісло перейде у режим очікування.

Масаж тиском повітря в області сідниць, литок та ступень.



> Натисніть кнопку масажу тиском повітря



Запуститься програма масажу тиском повітря.

Загальна тривалість 15 хвилин. Після цього масажне крісло перейде у режим очікування.

Масаж основних точок

Масаж окремих частин тіла

Partial

Під час роботи поточної масажної програми
> натисніть кнопку масажу окремих частин тіла

Partial

Масаж окремих частин тіла починається з масажу тієї частини, де наразі знаходяться масажні ролики. Виконується інтенсивний масаж на поверхні радіусом 8 см навколо вихідної точки.

> Ще раз натисніть кнопку **Partial**
Виконання програми масажу продовжиться.

Точковий масаж

Spot

Під час роботи поточної масажної програми
> натисніть кнопку точкового масажу **Spot**

Точковий масаж починається з масажу тієї частини, де наразі знаходяться масажні ролики. Виконується інтенсивний масаж безпосередньо вихідної точки.

> Ще раз натисніть кнопку **Spot**
Виконання програми масажу продовжиться.

Налаштування

Сила розминаючого та поплескуючого масажу


Strength

Налаштування масажу: легкий, середній, сильний або відключення.

> Натисніть кнопку сили масажу **Strength** в автоматичних програмах розминаючого та поплескуючого масажу.

При кожному натисканні цієї кнопки вибирається наступне можливе налаштування.

Відстань між масажними роликами

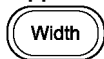

Налаштування: вузьке, середнє та широке.

> Натисніть кнопку відстані між роликами під час поплескуючого або перекочуючого масажу.



При кожному натисканні цієї кнопки вибирається наступне можливе налаштування.

Переміщення роликів вгору



> Натисніть кнопку «Вгору» під час часткового та точкового масажу
Масажні ролики перемістяться вгору.



Переміщення роликів вниз



> Натисніть кнопку «Вниз» під час часткового та точкового масажу
Масажні ролики перемістяться вниз.



Масаж тиском повітря: інтенсивність



Налаштування масажу: легкий, середній, сильний або відключення.

> Натисніть кнопку інтенсивності



При кожному натисканні цієї кнопки вибирається наступне можливе налаштування.

Масаж тиском повітря: масаж ступень



Налаштування: увімкнення та вимкнення.

> Натисніть кнопку масажу ступень



Функція вмикається та вимикається при кожному натисканні цієї кнопки.

Масаж тиском повітря: литки



Налаштування: увімкнення та вимкнення.

> Натисніть кнопку масажу литок



Функція вмикається та вимикається при кожному натисканні цієї кнопки.

Масаж тиском повітря: сідниці



Налаштування: увімкнення та вимкнення.

> Натисніть кнопку масажу сідниць



Функція вмикається та вимикається при кожному натисканні цієї кнопки.

Кнопки вибору положення для переміщення в положення сидячи або лежачи

Переміщення в положення сидячи або лежачи може виконуватися як з увімкненою, так і з вимкненою функцією масажу.

Кнопка вибору положення Підйом підставки для ніг



> Натисніть та утримуйте кнопку вибору положення



Підставка для ніг піднімається.

> Відпустіть кнопку вибору положення



Положення підставки зафіксується.

Кнопка вибору положення Підйом спинки



> Натисніть та утримуйте кнопку вибору положення



Спинка піднімається.

> Відпустіть кнопку вибору положення



Спинка зафіксується у поточному положенні.

Кнопка вибору положення **Нахил підставки для ніг**



> Натисніть та утримуйте кнопку вибору положення 

Підставка для ніг опуститься.

> Відпустіть кнопку вибору положення 

Положення підставки зафіксується.

Кнопка вибору положення **Нахил спинки**



> Натисніть та утримуйте кнопку вибору положення 

Спинка опуститься.

> Відпустіть кнопку вибору положення 

Положення спинки зафіксується.

5. Підготовка до користування приладом



Попередження!

- Не давайте дітям пакувальні матеріали. Небезпека удушення.
- Перш ніж розпочати використання приладу, прочитайте вказівки з техніки безпеки в розділі «Безпека».
- ► Див. розділ «Безпека» на стор. 80-81.



Увага!

- Масажне крісло може пошкодити покриття підлоги.

- Підкладіть під крісло відповідну нековзку підстилку.

Місце встановлення приладу

- Встановіть крісло на стійку та рівну поверхню.
- Перед введенням в експлуатацію очистіть простір перед масажним кріслом і за ним, щоб спинка могла вільно опускатися, а підставка для ніг підніматися.

Розпакування та встановлення


Масажне крісло MC5000 поставляється у картонній коробці.



Увага!

Не використовуйте для видалення упаковки гострі інструменти (наприклад, канцелярський ніж).

Крок 1

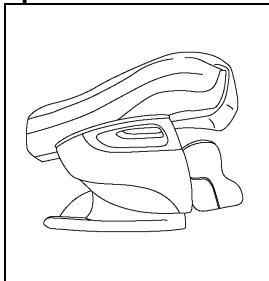


- Розкрийте картонну упаковку та міцно візьміться за масажне крісло у вказаних місцях.
- Вийміть крісло з картонної упаковки.
Для цього знадобиться чотири людини.
- Обережно видаліть весь пакувальний матеріал.

Крок 2




- Відкиньте спинку вгору так, щоб вона зафіксувалась з характерним клацанням.
Тепер спинка розташована під кутом 115°.

Крок 3

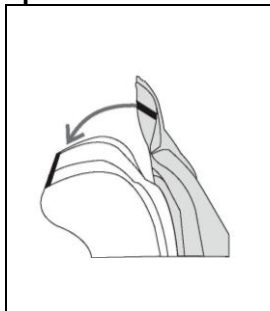

- За допомогою застібки-блискавки з'єднайте нижній кінець подушки для спини та задній кінець подушки для сидіння.
- Покладіть подушки для спини та сидіння через спинку на масажне крісло.
- За допомогою застібки-блискавки з'єднайте спинку та подушку для спини.

Крок 4

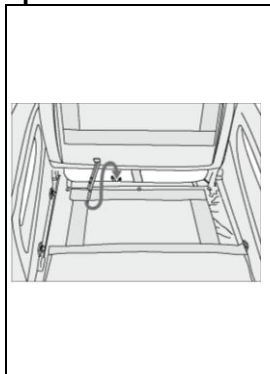

- Перекиньте подушку для сидіння назад через спинку.
- З'єднайте повітряні шланги, розташовані за сидінням, з повітряними шлангами в подушці для сидіння. Вставте шланг, позначений червоним, у червоне з'єднання.
Шланг, позначений білим кольором, вставте у біле з'єднання.
- Знову покладіть на сидіння

подушку для сидіння.



Важливо! Не затискайте шланги. Розташуйте їх так, щоб вони не перехрещувалися та не перегиналися.

Крок 5



- Вставте штекер у розетку.
 - Увімкніть головний вимикач, який знаходиться зі зворотної сторони внизу.
 - Увімкніть масажне крісло, натиснувши кнопку  «Увімк./вимк.» на пульті керування.
- Тепер масажне крісло готове до роботи.*

6. Користування приладом



Попередження!

- Перш ніж розпочати використання приладу, прочитайте вказівки з техніки безпеки в розділі «Безпека».
- Див. розділ «Безпека» на стор. 80-81.

Існує небезпека перекидання!

- Завжди обережно сідайте у крісло, встановлене у положенні сидячи.

Ніколи не сідайте у крісло, що знаходиться в положенні лежачи.

 Увага!

- При будь-якому подразненні негайно припиніть масаж.

 Важливо!

Ніколи не знімайте подушки для голови та спини під час масажу.

Перед увімкненням

- Для масажу одягайте зручний одяг.
- Вийміть усе з кишень (наприклад, ключі, складний ніж, мобільний телефон).
- Прийміть зручне розслаблене положення тіла.
- Завжди сідайте рівно посередині крісла, щоб хребет знаходився точно між масажними роликами.
- Масаж завжди повинен бути розслаблюючим і приємним. Якщо масаж викликає неприємні відчуття або біль, припиніть масаж або змініть своє становище.
- Якщо масажне крісло тривалий час не використовувалося, перед використанням перевірте належний стан приладу.

Увімкнення масажу


> Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.»  на пульті керування.

Після увімкнення масажне крісло переміщується у середнє положення лежачи. Тепер можна вибрати

програму масажу.

- Після вибору автоматичної програми масажу (розслаблюючий, освіжаючий або лікувальний масаж) датчики знімуть показники визначення розмірів користувача.
- Після вибору програми масажу (розминаючий, поплескуючий, перекочуючий масаж і масаж шиї) можна окремо підключити масаж тиском повітря.
- Натисніть на кнопку інтенсивності , щоб встановити силу масажу тиском повітря або вимкнути його.
- Масаж тиском повітря в області сідниць, ніг та ступень можна вмикати та вимикати окремо.
 - ▷ Кнопки програм масажу

Положення лежачи/положення сидячи

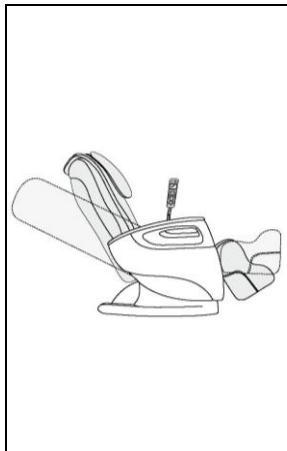

- > Встановлення масажного крісла у положення лежачи. Можливе налаштування горизонтального положення (лежачи). Спинку та підставку для ніг можна піднімати або опускати окремо. Переміщення в положення лежачи може виконуватися як з увімкненою, так і з вимкненою функцією масажу.
- ▷ Кнопки вибору положення для переміщення в положення сидячи або лежачи

Вимкнення масажного крісла

Після завершення програми масажу крісло автоматично перейде у режим очікування.



Увага!

Тривалість безперервного увімкнення приладу не повинна перевищувати 15 хвилин, інакше існує небезпека перегріву. Перед новим використанням дайте приладу охолонути протягом принаймні 30 хвилин.

Під час масажу прилад можна вимкнути будь-коли, натиснувши кнопку «Увімк./вимкн.» . Масажне крісло повернеться у вихідне положення. Індикатор роботи блимне.

- > Вимкніть масажне крісло, натиснувши головний вимикач у нижній частині спинки.
- > Вийміть штекер з розетки.

Додаткові налаштування, можливості управління Складання крісла



Щоб масажне крісло не займало багато місця для зберігання, його можна скласти.


- > Вимкніть пульт керування, натиснувши кнопку «Увімк./вимкн.» . Масажне крісло повернеться у

вихідне положення.

- > Після повернення у вихідне положення, натисніть головний вимикач, щоб вимкнути масажне крісло.
- > Вийміть штекер з розетки.
- > Зніміть фіксатор, розташований знизу на зворотній стороні спинки.
- > Обережно нахиліть спинку вперед і притисніть її до сидіння.

Перед цим за потреби покладіть подушку для спини на спинку.

Транспортувальні ролики

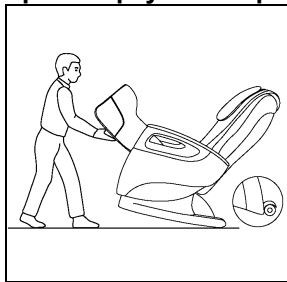

Масажне крісло оснащене роликами, розташованими на зворотній стороні.

За їх допомогою можна легко та зручно пересувати крісло по рівній поверхні.

Обережно! Використовуйте підстилку, щоб не пошкодити покриття підлоги.

7. Догляд і зберігання

Попередження!

- Вимкніть прилад після кожного застосування та перед чищенням,

натиснувши головний вимикач. • Вийміть штекер з розетки.

- > Протріть масажне крісло сухою або злегка зволоженою серветкою, що не залишає ворсинок.
- > Кожні два-три місяці протирайте крісло чистою серветкою, зі злегка нанесеним засобом для шкірозамінника.
- > Потім протріть крісло чистою сухою серветкою.

*Жир може залишати плями на шкірозаміннику.
Очищайте масажне крісло, використовуючи тільки
рекомендовані засоби для шкірозамінника.*



Важливо!

- Очищайте прилад тільки зазначеним чином.
- Не допускайте потрапляння рідин у прилад.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.
- Не використовуйте агресивні засоби для чищення.
Вони можуть пошкодити поверхню крісла.

▷ Складання крісла: див. вище.

Утилізація

З міркувань охорони навколишнього середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). У разі



виникнення запитань звертайтеся у місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



8. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Причина	Способи усунення
Шум тертя під час роботи.	Ці шуми є нормальними і походять від працюючого двигуна або масажних роликів, які труться об м'яку оббивку.	Втручання не потрібне.
Масаж не запускається.	Штекер не вставлено у розетку.	> Вставте штекер у розетку.
	Головний вимикач крісла не увімкнено.	> Увімкніть головний вимикач.
	Спрацював запобіжник і перервалося електроживлення крісла.	> Зверніться до сервісної служби.
Неможливо підняти або опустити спинку чи підставку для ніг.	Спинка або підставка для ніг перевантажені або заблоковані.	> Приберіть предмети, що блокують прилад.

Функція масажу вимикається під час роботи.	Спрацював захист від перегрівання.	> Вимкніть масажне крісло і дайте йому охолонути протягом 30 хв., а потім увімкніть його знову.
	Досягнута максимальна тривалість роботи.	

9. Технічні характеристики

Найменування виробу	Масажне крісло MC5000
Напруга/частота мережі	220-240 В ~, 50/60 Гц
Споживання енергії	200 Вт
Розміри (у положенні лежачи)	Довжина 191 см, ширина 73 см, висота 64 см
Вага	Нетто 61 кг брутто 76 кг
Максимальна вантажопідйомність	200 kg

10. Гарантія

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально

(наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені

користувачем);

- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку. При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових,

8, тел.:(044) 247 67 34;або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ Хелс Менеджер,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.