

# beurer

## GS 300



### Скляні ваги

### Інструкція з користування приладом



Бойпер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина  
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • Ел. пошта: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)  
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»  
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69  
[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) • Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)





**Шановний покупець!**

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку  
Beurer. Компанія Beurer-європейський**

**лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.**

**Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та  
смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря.  
Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади  
для догляду за обличчям, тілом та волоссям.**

**Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт  
і затишок у Вашому домі.**


**Щоб користуватись цим приладом надійно та із  
задоволенням, уважно прочитайте інструкцію.  
Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка  
служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте  
інструкцію в доступному місці.**

**З найкращими побажаннями,  
компанія Beurer**


---

## **1. Підготовка до користування приладом**



---

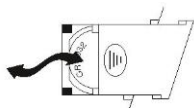

**Вставте батарейку або видаліть  
захисну ізоляційну стрічку.**

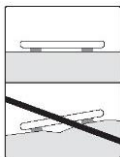


**Встановіть ваги на тверду рівну  
поверхню.**

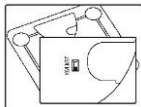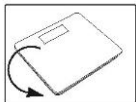

Маса змінюється.

KG → LB → ST  
d = 0,1 kg/0,2 lb/1 lb

## 2. Зважування

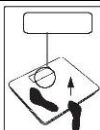


Станьте на ваги.

Швидкий старт



Під час вимірювання стійте  
прямо та не рухайтесь!


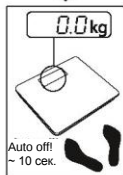


**Примітка:**


При першому використанні та зміні  
розташування ваг.



### 3. Повідомлення про помилки

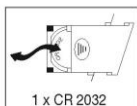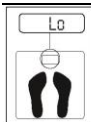

Батарейки розряджені

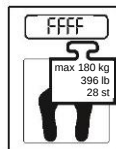


Перевищено максимально допустиме навантаження

#### Пояснення символів

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці та на типовій табличці приладу використовуються наведені нижче символи:

|  |                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Прочитати інструкцію!</b><br>Дотримуйтесь інструкції з користування приладом                                                                                                                   |
|  | <b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b><br>Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.                                                                                                          |
|  | <b>УВАГА</b><br>Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.                                                                                                                 |
|  | <b>Вказівка</b><br>Вказує на важливу інформацію.                                                                                                                                                  |
|  | <b>Утилізація батарейок</b><br>Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник з загальними відходами бо містять небезпечні речовини для оточуючого середовища. |
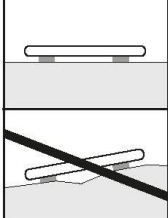
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | <b>Утилізація приладу</b><br>Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).                                                                           |                                                                                    |                                                          |
|    | <b>Утилізація упаковки</b><br>Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища                                                                                        |                                                                                    |                                                          |
|    | <b>Виробник</b><br>Назва, контакти компанії виробника                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                          |
|    | <b>Маркування CE</b><br>Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив                                                                                                             |                                                                                    |                                                          |
|    | <b>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу</b><br>Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу |                                                                                    |                                                          |
|   | Встановлюйте ваги на стійку та рівну поверхню.                                                                                                                                                                |  | Обережно<br>слизько: не ставайте мокрими ногами на ваги. |
|  | небезпека перекидання: ставайте у центр вагової платформи.                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                          |

## **Користування приладом за призначенням**

Пристрій призначений лише для зважування людей.

Прилад призначений для індивідуального користування.

Забороняється користування приладом в медичних і комерційних цілях.

### **Вказівки з техніки безпеки**

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм. Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких дітей. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.
- Не давайте дітям пакувальні матеріали від ваг (небезпека удушення). Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

#### **Увага**

- Не ставайте на один бік ваг: Існує небезпека перекидання!
- Не ставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога – **небезпека падіння внаслідок**

## **підсковзування!**

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Діти не повинні виконувати очищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.

### **Увага!**

### **Використання батарейок**

- У разі контакту електроліту зі шкірою

або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

 **Увага!**

- **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**
- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.

 **Увага!**

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.

- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінійте всі батарейки одночасно, якщо розрядилась одна з них.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

### **Загальні вказівки**

- Максимальне навантаження складає 180 кг (396 lb/28 st), Ціна поділки 100 г (0,2 lb/1 lb).
- Чищення: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте миючий засіб. Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Ваги слід берегти від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури та електромагнітних полів. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла.
- Встановіть ваги на рівну тверду поверхню. Твердість поверхні є необхідною умовою для правильного вимірювання.

- Якщо у Вас є питання щодо користування приладом, звертайтеся до Вашого продавця або в сервісну службу.
- Перед висуненням претензій спочатку перевірте батарейки. За потреби замініть їх.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованими торговельними представниками.

## Утилізація

Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання. За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.



Дотримуйтеся місцевих законодавчих норм із утилізації відходів. Утилізуйте прилад згідно з вимогами Директиви ЄС про утилізацію



електричного та електронного обладнання 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). З усіх питань щодо утилізації звертайтеся у відповідну комунальну службу.

Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



## **Гарантія / Сервісне обслуговування**

**Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).**

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження, отримані в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутні деякі дані або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового

використання, застосовувався у комерційних цілях/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; Фірми-продавця, де було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

[www.beurer.com.ua](http://www.beurer.com.ua) Ел. пошта: [ofis@beurer.kiev.ua](mailto:ofis@beurer.kiev.ua)

В інструкції можливі неточності та зміни