

beurer

НК 42 Supercosy



Електрична грілка

Інструкція з використання



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!
Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер у категорії високоякісних пристрій для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також бьюти пристрій для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим пристрієм надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer

Зміст

1. Комплект постачання	4.4 Встановлення температури
1.1 Опис пристрію	4.5 Автоматичне вимкнення
2. Важливі вказівки Збережіть для подальшого використання!	4.6 Вимкнення
3. Використання за призначенням	5. Очищення та догляд
4. Використання	6. Зберігання
4.1 Безпека	7. Утилізація
4.2 Підготовка до використання	8. Що робити при виникненні несправностей?
4.3 Увімкнення	9. Технічні характеристики
	10. Гарантія / Сервісне обслуговування

Пояснення символів

	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з використання		Можна прати в машині при 30°C у делікатному режимі
	Не встромляти голки!		Не сушити в сушильній машині барабанного типу
	Не використовувати в складеному або не розправленому стані!		Не прасувати праскою
	Для дітей старше трьох років.		Хімчистка заборонена
	Виробник Назва, контакти компанії виробника	 <small>ОЕКО-ТЕХ СТАНДАРТ 100 Інтернаціональний стандарт якості тканин www.oeko-tex.com/standart100</small>	Використані в цьому приладі тканини відповідають високим вимогам стандарту Оеко-Tex 100, що підтверджено Дослідницьким інститутом Хохенштайн.
	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).		


	НЕБЕЗПЕЧНО Прилад не можна використовувати поблизу води або у воді (наприклад, в умивальнику, душі або ванні) – небезпека ураження електричним струмом!
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколошнього середовища
	Маркування СЕ Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА! Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	ВКАЗІВКА: Вказує на важливу інформацію
	Прилад має подвійну ізоляцію, тому відповідає класу захисту 2.
	Знак KEMA KEUR підтверджує безпеку електротехнічного виробу і його відповідність нормам.

1. Комплект постачання

Електрогрілка, перемикач, інструкція з використання

1.1 Опис приладу

1. Штекер
2. Кабель
3. Перемикач
4. Світловий індикатор температурних режимів
5. Повзунок для увімкнення/вимкнення і зміни температурних режимів
6. Електричний з'єднувач

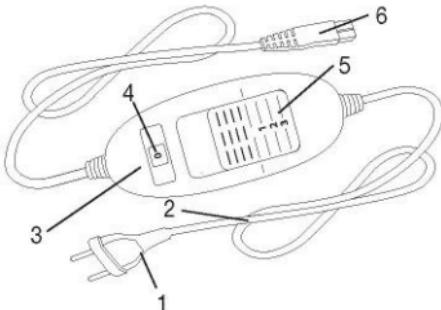

2. Важливі вказівки

Збережіть для подальшого використання!

Щоб запобігти завданню шкоди здоров'ю, необхідно дотримуватися таких пунктів:

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Недотримання вказівок може привести до матеріальних збитків або травм (ураження електричним струмом, опік шкіри, пожежа та ін.). Наступні вказівки з техніки безпеки і попередження про небезпеки служать не тільки для

охорони Вашого здоров'я або здоров'я третіх осіб, а й для захисту виробу. Тому обов'язково виконуйте ці вказівки та передаючи електрогрілки іншій людині також передавайте інструкцію.

- Електрогрілку забороняється використовувати людям зі зниженою чутливістю до тепла та особам, які потребують захисту та догляду, бо вони не можуть реагувати на перегрів (наприклад, діабетикам, людям з хворобливими змінами шкіри або зарубцьованими ділянками шкіри в місці прикладання грілки, а також після прийому знеболюючих медикаментів або алкоголю).

УВАГА

- Забороняється використовувати дану електрогрілку для маленьких дітей (до 3-х років), бо вони не можуть реагувати на перегрів.
- Дану електрогрілку забороняється

використовувати дітям (віком від 3 до 8 років), за винятком тих випадків, коли перемикач попередньо налаштований батьками або іншими дорослими, які несуть відповідальність за дитину, а також якщо дитина навчена безпечно використовувати електрогрілку.

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям грatisя з електрогрілкою.
- Чищення та технічне обслуговування дітьми дозволяється лише під наглядом дорослих.

- Електрогрілка не призначена для медичного використання в медичних закладах.
- Дана електрична грілка призначена виключно для домашнього/особистого використання. Застосовувати прилад в комерційних цілях заборонено.
- Дану електричну грілку забороняється використовувати для обігріву тварин.
- Не встремляйте голки!
- Використовуйте дану електричну грілку тільки в сухих приміщеннях.
- Не використовуйте в складеному або зім'ятому вигляді!
- Забороняється використовувати вологу електрогрілку!
- Електрогрілку дозволяється використовувати тільки з перемикачем, зазначеним на етикетці.
- Дану електричну грілку можна під'єднати тільки до мережової напруги, вказаної на етикетці.

• Електричні і магнітні поля, що випромінюються цієї електрогрілкою, при певних обставинах можуть порушити працездатність Вашого кардіостимулятора. Особливих приводів для занепокоєння немає – ці випромінювання набагато нижче гранично допустимих значень: напруга електричного поля: макс. 5000 В/м, напруга магнітного поля: макс. 80 А/м, магнітна індукція: макс. 0,1 мТл.

Тому перед застосуванням електрогрілки проконсультуйтесь зі своїм лікарем та виробником кардіостимулятора.

• Не тягніть, не перекручуйте та не перегинайте кабель живлення.

• У разі неправильного розміщення існує небезпека зачепитися за кабель і перемикач грілки, запутатися в кабелі і задихнутися, спіtkнутися об нього або наступити на нього. Користувач

повинен переконатися в тому, що всі кабелі, як вільні, так і всі інші, прокладені безпечно.

- Необхідно постійно перевіряти електрогрілку на пошкодження або зношення.

Якщо електрогрілка має такі сліди або використовувалась не за призначенням, перед черговим застосуванням її необхідно перевірити у представника фірми-виробника.

- Категорично забороняється розкривати конструкцію грілки (включаючи додаткові деталі) і ремонтувати її самостійно, оскільки надійність її роботи в цьому випадку не гарантується. Недотримання цих вимог призводить до втрати гарантії.

- На увімкнену електрогрілку забороняється ставити:

- предмети, що мають гострі країки та ті, що можуть залишити вм'ятини,

- джерела тепла, наприклад грілки, електричні грілки або подібні предмети.
- Електронні компоненти всередині перемикача під час використання електрогрілки нагріваються. Тому забороняється накривати перемикач або класти його на електрогрілку, коли вона увімкнена.
- Обов'язково дотримуйтесь вказівок щодо використання (розділ 4), очищення та догляду (розділ 5) і зберігання (розділ 6).
- З додатковими питаннями щодо використання приладів Beurer звертайтеся в уповноважений сервісний центр.

УВАГА

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до

сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.

- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕЧНО

- Ніколи не використовуйте прилад біля ванни, умивальника, душу або інших посудин із водою чи іншою рідиною – небезпека ураження електричним струмом!
- Якщо прилад використовується у ванній кімнаті, після застосування штекер необхідно витягнути з розетки, оскільки біля води може бути небезпечно, навіть якщо прилад вимкнений.

3. Використання за призначенням



УВАГА

Електрогрілка призначена тільки для обігріву людського тіла.

4. Застосування

4.1 Безпека



УВАГА

Електрогрілка оснащена системою безпеки. Датчики запобігають перегріванню електрогрілки по всій поверхні завдяки автоматичному вимкненню в разі несправності. Якщо система безпеки вимкнула електрогрілку, індикатори температурних режимів в увімкненому стані більше не підсвічуються. Зверніть увагу на те, що з міркувань безпеки в разі несправності електрогрілку більше вмикати не можна, її необхідно відправити на ремонт у сервісний центр за вказаною адресою.


4.2 Підготовка до використання



УВАГА

Простежте за тим, щоб електрогрілка під час застосування не м'ялася та не утворювала складок.

- Спочатку підключіть перемикач до нагрівального елементу, з'єднавши електричний з'єднувач.
- Після цього вставте штекер у розетку.

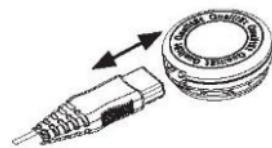

4.3 Увімкнення

Встановіть повзунок для увімкнення/вимкнення і перемикання температурних режимів на рівень 1, 2 або 3, щоб увімкнути електрогрілку.

Коли електрогрілка увімкнена, індикатор температурних режимів (4) підсвічується.

4.4 Встановлення температури

Режим 0: вимк.

Режим 1: мінімальний рівень нагрівання



Режим 2: середній рівень нагрівання

Режим 3: максимальний рівень нагрівання



ВКАЗІВКА

- Ваша електрогрілка нагріється швидше, якщо ви спочатку встановите верхній режим температури.

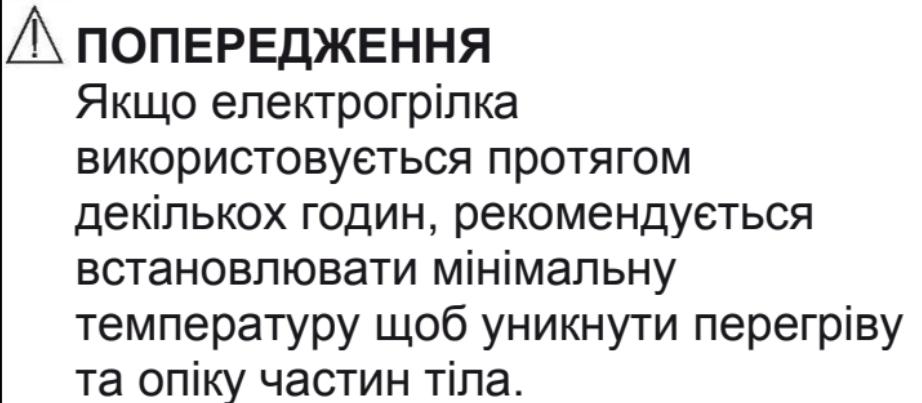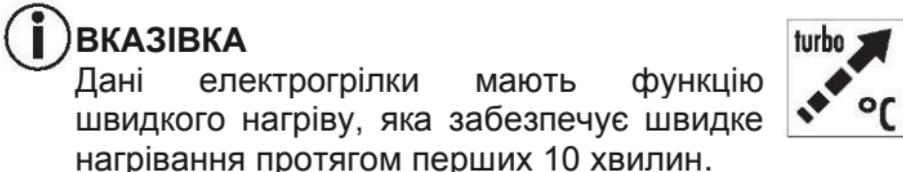

4.5 Автоматичне вимкнення

Дана електрогрілка оснащена функцією автоматичного вимкнення. Подача тепла припиняється приблизно через 90 хвилин після початку роботи електрогрілки.



Потім починає блимати індикатор температурних режимів. Для повторного увімкнення електрогрілки вам необхідно спочатку перевести повзунок перемикача (5) в положення «0» (вимк.). Приблизно через 5 секунд прлад можна ввімкнути повторно

4.6 Вимкнення

Встановіть повзунок перемикача в положення «0» (вимк.), щоб вимкнути електрогрілку. Тоді індикатори температурних режимів згаснуть.



ВКАЗІВКА:

Якщо електрогрілка не використовується, встановіть повзунок перемикача в положення «0» (вимк.) і витягніть штекер з розетки. Після цього відключіть перемикач від електрогрілки, роз'єднавши електричний з'єднувач.

5. Чищення і догляд



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед чищенням завжди витягуйте штекер із розетки. Після цього відключіть перемикач від електрогрілки, роз'єднавши електричний з'єднувач. Існує небезпека ураження електричним струмом.



УВАГА

- Не допускайте контакту перемикача з водою або іншими рідинами! Інакше він може бути пошкоджений.

Для очищення перемикача використовуйте суху безворсову серветку. Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення.

Незначні цятки на електрогрілці можна видалити вологою серветкою за потреби використати невелику кількість м'якого рідкого миючого засобу.



УВАГА

- Зверніть увагу на те, що електрогрілку забороняється мити, піддавати хімічному чищенню, віджимати, сушити в машині, розтягувати або прасувати.

Електрогрілку можна прати в пральній машині. Встановіть пральну машину на делікатний режим прання з температурою 30°C (для вовни). Використовуйте м'який миючий засіб, при дозуванні дотримуйтесь вказівок виробника.



УВАГА

- Зверніть увагу! Занадто часте прання електричної грілки може позначитися на ній небажаним чином. Тому протягом усього терміну служби електрогрілку можна прати в пральній машині не більше 10 разів.

Відразу після прання розтягніть ще вологу електрогрілку, надавши її вихідного розміру та форми, і розкладіть для просушування на стійці для сушіння білизни.



УВАГА

- Не використовуйте прищіпки та аналогічні пристрої для закріплення електрогрілки на стійці для сушіння білизни. Це може пошкодити електрогрілку.
- З'єднуйте вимикач з грілкою тільки після того, як електричний з'єднувач і грілка повністю висохнуть. В іншому випадку можливі пошкодження електрогрілки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У жодному разі не вмикайте вологу електрогрілку для просушування! Існує небезпека ураження електричним струмом.

6. Зберігання

Якщо електрогрілка не використовується тривалий час, рекомендується зберігати її в оригінальній упаковці. Для цього відключіть перемикач від електрогрілки, роз'єднавши електричний з'єднувач.



УВАГА

Спочатку дайте електрогрілці охолонути. В іншому випадку можливі пошкодження електрогрілки. Щоб уникнути сильних перегинів, не кладіть предмети на електрогрілку, коли вона не використовується.

7. Утилізація

З міркувань охорони навколишнього природного середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби.



Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Прилад необхідно утилізувати відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

8. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Причина	Рішення
Індикатори температурних режимів не підсвічуються, в той час як - перемикач добре з'єднаний з електрогрілкою; - штекер включений в справну розетку; - повзунок встановлений на режим 1, 2 або 3.	Система безпеки повністю вимкнула електрогрілку.	Надішліть електрогрілку і перемикач до сервісного центру.

9. Технічні характеристики

Див. заводську етикетку на електрогрілці.

10. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення

(батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до: уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.: (044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад; або Дистрибутора в Україні : ТОВ Хелс Менеджер, Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69; www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни