


beurer

MG 16

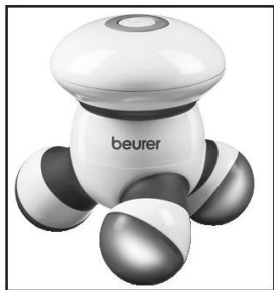

Міні-масажер

Інструкція з користування приладом



Бойрер ГмбХ • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистрибутор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

**Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer – європейський
лідер у категорії високоякісних приладів для
краси і здоров'я.**

**Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та
смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі
повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також
б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та
волоссям.**

**Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує
комфорт і затишок у Вашому домі.**


**Щоб користуватись цим приладом надійно та із
задоволенням, уважно прочитайте інструкцію.
Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка
служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте
інструкцію в доступному місці.**


**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**



3. Пояснення символів

В інструкції з користування приладом використовуються такі символи:


	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	ВКАЗІВКА Вказує на важливу інформацію.
	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	Утилізація упаковки



	Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища.
	Утилізація батарейок Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник із загальними відходами, оскільки наявні небезпечні речовини для оточуючого середовища
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу

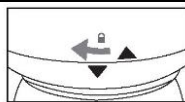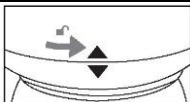 **Перед користування приладом прочитайте важливі вказівки й обов'язково їх дотримуйтеся.**

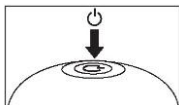

Підготовка до користування приладом: зніміть кришку відсіку для батарейок. Вставте три батарейки 3 AAA відповідно до маркування. Знову встановіть кришку відсіку для батарейок. Слідкуйте за тим, щоб кришка перебувала в правильному положенні.



Керування: натисніть кнопку (1x УВІМК.  / 2x  ВИМК.)

Загальні вказівки

- Використовуйте прилад за призначенням і згідно інструкції з користування приладом. Виробник не несе відповідальність за збитки, отримані внаслідок використання


приладу не за призначенням або недбалого поводження з ним.

- ⚠ Прилад призначений для масажу окремих частин тіла. НЕ використовуйте прилад для тварин, дітей, за наявності поранень шкіри (наприклад, опіків, відкритих ран, рубців), під час вагітності, після операцій, на чутливих ділянках тіла (наприклад, на голові, суглобах). Якщо Ви маєте кардіостимулятор, імплантати або інші медичні прилади чи якщо Ви невпевнені, що Вам можна користуватися приладом, то перед його застосуванням

проконсультуйтеся з лікарем.

- ⚠ Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці! Діти можуть проковтнути батарейку!
- У разі контакту електроліту зі шкірою або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.
- Завжди замінюйте всі батарейки одночасно.
- Під час чищення приладу використовуйте тільки злегка зволожену ганчірку. Ніколи не занурюйте прилад у воду!
- Цей прилад не призначений для

використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, з недостатніми знаннями або досвідом, окрім випадків, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримали вказівки щодо використання приладу. Необхідно наглядати за дітьми та не дозволяти їм гратися із приладом.

- З міркувань охорони навколишнього природного середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно 

з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).

Із запитаннями звертайтеся до місцевої комунальної служби, відповідальної за утилізацію відходів.

- Використані, повністю розряджені батарейки необхідно викидати у спеціальні контейнери або здавати в пункти приймання спеціальних відходів.
- Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців

з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку).

Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;

- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батареї), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового

використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово використовувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів термін дії цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.