

beurer

PS 240



Підлогові ваги Інструкція з використання



Бойлер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку Beurer. Компанія Beurer-європейський лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.


Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.


Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місті.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer.



1. Підготовка до використання

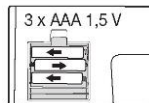

Вставте батарейку або видаліть захисну ізоляційну стрічку.

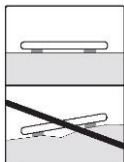


Встановіть ваги на тверду рівну поверхню.

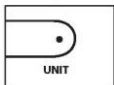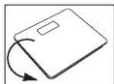


Маса змінюється.
(kg/lb/st).

2. Зважування

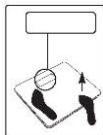

Швидкий старт

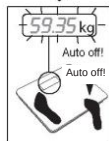


Станьте на ваги.

Під час вимірювання стійте прямо та не рухайтесь!





Примітка: При першому використанні та зміні розташування ваг.

3. Повідомлення про помилки

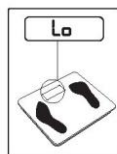

Батарейка розряджена.

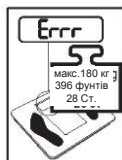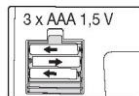


Перевищено максимально допустиме навантаження

Пояснення символів

На приладі, в інструкції з використання, на упаковці та на типовій табличці приладу використовуються наведені нижче символи:

	Прочитати інструкцію! Дотримуйтесь інструкції з використання
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Вказує на важливу інформацію.
	Утилізація батарейок Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник з загальними відходами бо містять небезпечні речовини для оточуючого середовища.
	Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив

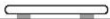	Виробник Назва, контакти компанії виробника		
 	Встановлюйте ваги на стійку та рівну поверхню.	 	Обережно слизько: не ставайте мокрими ногами на ваги.
	Небезпека перекидання: ставайте у центр вагової платформи.		



Використання за призначенням

Пристрій призначений лише для зважування людей. Прилад призначений для індивідуального використання. Забороняється використання в медичних і комерційних цілях.

Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм.

Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких діток. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.

- Не давайте дітям пакувальні матеріали від ваг (небезпека удушення).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Діти не повинні виконувати чищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.

- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.

 Увага!

- Не ставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога – **небезпека падіння внаслідок підсковзування!**
- Не можна ставати на одну сторону ваг: Існує небезпека перекидання!

 Увага!

- **Використання батарейок**

У разі контакту електроліту зі шкірою або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

 Увага!

- **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**
- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.

- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.



Увага!

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінюйте всі батарейки одночасно, якщо розрядилась одна з них.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!

• Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

Важливі вказівки

- Максимальне навантаження складає 180 кг (396 фунтів/28 Ст.), Ціна поділки 50 г (0,2 фунти/0,005 Ст.).
- **Чищення:** Для очищення ваг використовуйте вологу безворсову серветку. Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Ваги слід берегти від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури та електромагнітних полів. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла.
- Встановіть ваги на рівну тверду поверхню. Твердість поверхні є необхідною умовою для правильного вимірювання.
- Якщо у Вас є питання щодо користування приладом, звертайтеся до Вашого продавця або в сервісну службу.
- Перед висуненням претензій спочатку перевірте батарейки. За потреби замініть їх.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованими торговельними представниками.
- Використані, повністю розряджені батарейки та акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання. Утилізація батарейок є обов'язковою за законом.

- **Інформація:** Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин:

Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.



- Дотримуйтесь місцевих законодавчих норм із утилізації відходів. Утилізуйте прилад згідно з вимогами



Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання 2002/96/EC — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). З усіх питань щодо утилізації звертайтеся у відповідну комунальну службу.

- Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу

до електромережі.

- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідини або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.: (044) 247 67 34;

або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;
або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер»,
Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;
www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни